


介護・救護・搬送用マット

平成 23 年度宮崎県ものづくり産業新製品開発支援事業製品

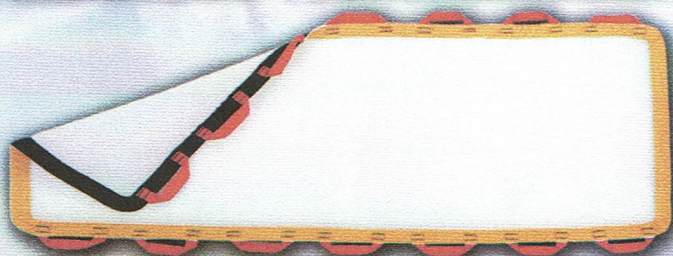

リーフ

意匠登録済 2010-007685
開発研究協力：宮崎県医療福祉技術分科会
TAIS コード 01288-000001

万が一の救急搬送に役立ちます

- “リーフ” は、宮崎の在宅医療や介護の現場を熟知した医師により開発されました。
- “リーフ” は、旭化成せんい株式会社が開発した立体編物「フュージョン」を使用しています。

特徴

- 通常の担架と違い、非常階段など狭い場所での搬送が容易に行えます。
- 急な傾斜地や障害物が多い場所でも使えます。
- 軽量でコンパクトに収納できます。
- メッシュの水を吸わない素材で、透水性が高く、風雨や水中でも使えます。
- 強度と共に伸縮性があるので、搬送者を優しく包み込み搬送時の衝撃をやわらげます。
- 災害だけでなく、食中毒、熱中症、水難、AED との併用などさまざまな救急搬送に使用できます。



製品仕様		
サイズ		
W500mm×L1400mm×t10mm (収納時のサイズ: W380mm×D250mm×t80mm)		
材質		
マット部	ポリエステル	0.53kg
縁部	ポリエステル	
取手部	ポリエステル	

FUSION

Asahi KASEI 旭化成商事株式会社

リーフの強度試験

財団法人ボウガン品質評価機構生活用品試験センターの実用耐荷重試験は、150Kgで24時間。取手は、700Nの荷重による10,000回の繰り返しで異常なしとの評価を頂きました。
(品質試験番号 NO. 11805450-1 NO. 11805450-2)

フュージョンは旭化成せんい(株)の登録商標です。

正規代理店

FF FULL FAITH

株式会社 フルフェイス

〒814-0022

福岡県福岡市早良区原6丁目19-19

TEL 092-707-7690


FAX 092-707-7691

介護用移乗マット「リーフ」取扱説明書

VOL.1.2

2012.2.10

各部の名称

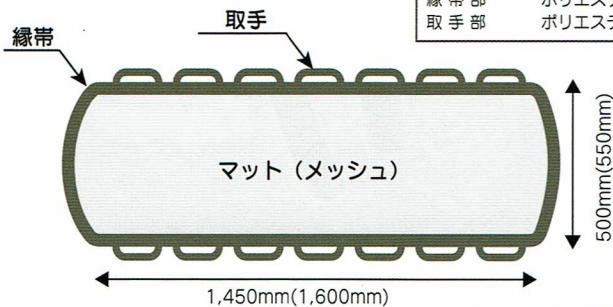

材質


マット部	ポリエステル
縁帯部	ポリエステル
取手部	ポリエステル

◎商品パンフレットの「使用上のご注意」の各項目を確認し、ご理解の上で使用して下さい。

◎リーフは縦横に伸縮します。マットに人を乗せ移動する場合は、必ず持ち上がる位置を確認してから移乗して下さい。

◎取手は素手で、荷重がかかっても滑らないようしっかり持って下さい。

◎マットの表裏を確認し、表面に人を乗せます。

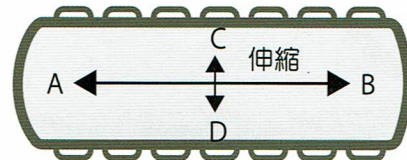


AB方向に10～15%、
CD方向に30～40%
伸びます。


リーフの支え位置

◎頭の位置は必ず、縁帯に掛かるようにして下さい。


① 3人で支える場合の位置

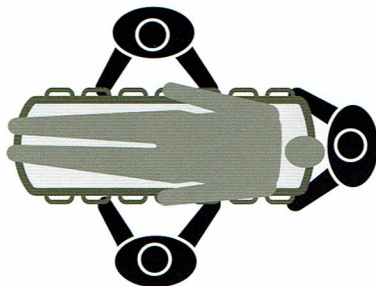


② 2人で支える場合の位置

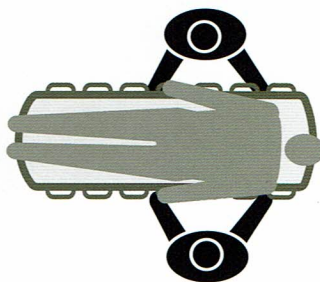


③ 4人で支える場合の位置

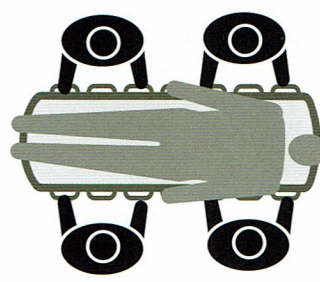


リーフの使用事例

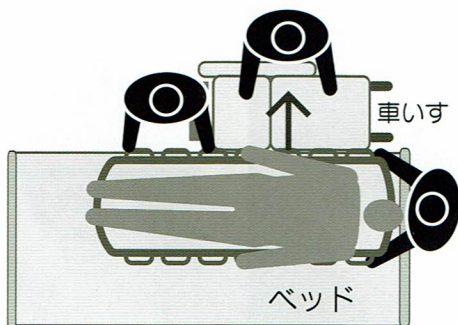

ベッドから車いすへの移乗

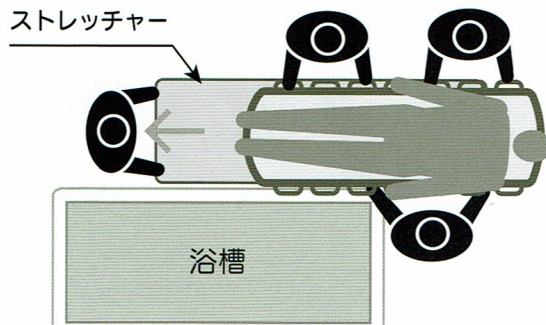


ストレッチャーから浴槽への移乗

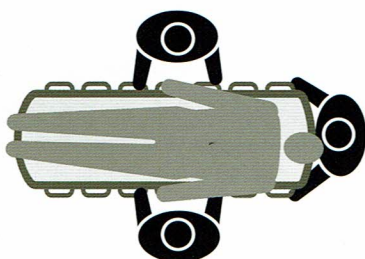


自動車への移乗

「リーフ」を洗濯機や乾燥機に入れる場合は必ずネットを使用して下さい。

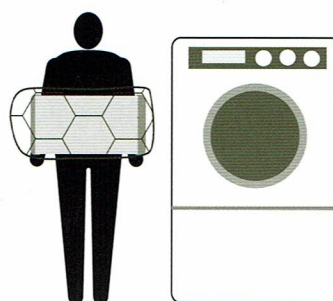


表面と裏面の見分け方

表面のハンドルの形状

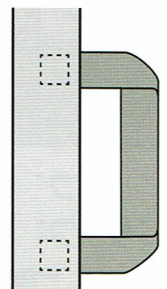

裏面のハンドルの形状

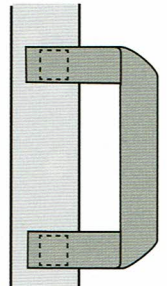

「リーフ」は介護の現場で、様々な使い方が出来ますが、移乗に普段使われているバスタオルや移乗シートと併用することで介護の負担を軽減することも出来ます。また標記以外での使用事例や改善点などのご意見を戴ければ幸いです。